




MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL REPROCESAMIENTO DE DUODENOSCOPIOS



LAS RECOMENDACIONES DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) RESPECTO AL REPROCESAMIENTO DE LOS DUODENOSCOPIOS

1 **Limpiar**
meticulosamente el
mecanismo del elevador y
los orificios que rodean el
mecanismo del elevador de
forma manual y después de
la limpieza, inspeccione el
orificio del elevador y repita
la limpieza si hay suciedad o
residuos visibles.

2 **Implementar**
programa integral de
control de calidad para el
reprocesamiento de
duodenoscopios.

3 **Seguir**
recomendaciones del
fabricante: del
duodenoscopio para la
inspección, la prueba de
fugas y el mantenimiento
del equipo.

4 **Antes de cada uso**
inspeccione detenidamente
y retire del servicio para su
evaluación, repare o
reemplace cualquier
duodenoscopio que muestre
signos visibles de daño.

6 **Devuelva el
duodenoscopio
al fabricante**
como se recomienda en
los manuales de instrucción
del duodenoscopio, para
inspección y
mantenimiento del
dispositivo al menos una
vez al año.

5 **Durante cada ciclo del
reprocesamiento**
realice pruebas de fugas y retire
del servicio para su evaluación,
repare y reemplace cualquier
duodenoscopio que muestre
signos de fugas.