



CARACTERÍSTICAS DEL REPROCESAMIENTO DEL ENDOSCOPIO QUE DIFICULTAN SU EFICACIA

Los pasos a seguir son propensos a errores humanos, sobre todo durante la limpieza previa y limpieza manual.

- 1.- Mantener la concentración enzimática indicada del desinfectante. El endoscopio debe estar completamente seco previo a ser sumergido en el DAN.
- 2.- Se debe mantener rigurosamente las condiciones señaladas por el fabricante en cuanto a temperatura y pH. Asegurar condiciones de infraestructura e insumos.
- 3.- Se debe cumplir con el tiempo y condición requerida respecto a la exposición del endoscopio al desinfectante el que siempre debe estar completamente sumergido.
- 4.- Se requiere que el endoscopio se encuentre libre de materia orgánica previa exposición al DAN. Asegurar la existencia y mantenimiento de los accesorios para realizar la limpieza a fondo.
- 5.- Al término del proceso, se requiere que el Endoscopio quede totalmente seco interno y externamente.
- 6.- Los endoscopios deben ser guardados en forma vertical evitando dobleces, protegidos de daños y contaminación.