

APLICACIÓN DE TORNQUETE DE COMBATE EN EESS



Esta técnica se aplica en pacientes con sangrado suficientemente severo. El paciente está en riesgo de mareos, pérdida de conciencia; por lo tanto debe instalarse de manera rápida y oportuna en una posición supina.



Inserte la extremidad herida a través del bucle de la banda autoadherible.

Hale con firmeza la banda autoadherible y sujétela firmemente por atrás sobre la misma.

Adhiera la banda alrededor del brazo. No adhiera la banda después del clip.

Cierre la banda del tornio hasta que se detenga el sangrado (no más de 3 giros de 180

Fije la barra en su lugar con el clip del tornio.

Adhiera la banda sobre la barra del tornio. Para extremidades pequeñas, siga adhiriendo la banda alrededor de la extremidad.

Asegure barra y banda con la correa del tornio, jale con firmeza y adhiérala al aro opuesto sobre el clip del tornio.

